

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas līdzeklis

ĪPAŠĪBAS UN INDIKĀCIJAS

Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdums ir universāls šķīdums, kas satur citrāta bufersistēmu ar pH 7.4 un konservantus, kas novērš proteīnu depozītu uzkrāšanos. Ideāli piemērots visu miksto un krāsaino kontaktlēcu dezinfekcijai, tīrīšanai, uzglabāšanai un mitrināšanai. Ir pierādīta šī šķīduma piemērotība īpaši silikon-hidrogēla lēcu tīrīšanai. Hidroksietilcelulozes un citrāta buferšķīduma savienojums ir tā sabalansēts, nodrošinot gan efektīvu antibakteriālu iedarbību, gan izcilu komfortu un ilgstošu mitrināšanu. ***Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdums*** ir paredzēts kontaktlēcu skalošanai, tīrīšanai, dezinfekcijai un mitrināšanai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi nomazgājiet un noslaukiet rokas. Izņemiet kontaktlēcas, dažas sekundes maigi berzējiet katru lēcu plaukstā ar ***Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdumu***. Noskalojiet lēcas ar ***Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdumu***. Ievietojiet lēcas ***Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdumā*** uz vismaz 4 stundām vai visu nakti. Pirms lēcu lietošanas noskalojiet tās ar ***Diviniti Ocean Moist kontaktlēcu kopšanas šķīdumu***. Aizveriet pudeli pēc katras lietošanas.

NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI

Pēc pirmās attaisīšanas, izlietojiet šķīdumu 90 dienu laikā. Uzglabājiet to temperatūrā no 5°C līdz 30°C. Nelietojiet šķīdumu, ja pirms pirmās lietošanas ir bojāts pudeles aizslēdzēj mehānisms. Ja lēcas tiek atstātas šķīdumā ilgāk par 7 dienām, atkārtojiet tīrīšanas procedūru. Nelietojiet šo produktu, ja jums ir alerģija vai jutīgums pret kādu no sastāvdaļām. Ja jūs jūtat jebkādu kairinājumu vai citas nepatīkamas sajūtas, izņemiet kontaktlēcas un konsultējieties ar savu speciālistu. Uzglabājiet šķīdumu bērniem nesasniedzamā vietā. Nelietojiet produktu pēc tā derīguma termiņa beigām. Nekad neskalojiet kontaktlēcas ar krāna ūdeni. **NENORIJET ŠĶĪDUMU.** Nelietojiet acu medikamentus kontaktlēcu lietošanas laikā, ja vien to nav norādījis ārsts. Mainiet kontaktlēcu kopšanas šķīdumu, tikai konsultējoties ar savu redzes aprūpes speciālistu.

KONTRINDIKĀCIJAS

Kontrindikācijas nav novērotas.

SASTĀVS

Etilēndiamīna tetra-etiķskābe 0.01%, poli-heksa-metilēn-biguanīds 0.0002%, hidroksietilceluloze 0.0525%, poloksamērs 407 0.234%, polikvatērijs 0.006%, citronskābe, tribāzisks nātrija citrāts, nātrija hlorīds, nātrija bezūdens hlorīds, attīrīts ūdens.

RAŽOTĀJS

Soleko SpA – Via Ravano snc 03037 Pontecorva (FR) /Italy

Tel. +39 06 4395508 www.soleko.it

IZPLATĪTĀJS

SIA OC VISION -

Elijas ielā 17-4, Rīgā, LV-1050. Tel. 67312731 www.ocvision.eu

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2019