

**1 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

LV Latviski

**1.1 Tirdzniecības nosaukums / apraksts**

Zīmols: **Dr.Lensor CL SOLUTION**

MULTIFUNKCIONĀLS KONTAKTLĒCU KOPŠANAS LĪDZEKLIS

VISU VEIDU MIKSTO KONTAKTLĒCU DEZINFEKCIJAI, GLABĀŠANAI, TĪRĪŠANAI, SKALOŠANAI UN MITRINĀŠANAI. PIEMĒROTS JUTĪGĀM ACĪM, ĀTRAI KONTAKTLĒCU KOPŠANAI 5-7 MINŪTES.

TAS SATUR NĀTRIJA HIALURONĀTU UN TAMARINDU



**1.2 Apraksts**

Pateicoties izcilajām hialuronskābes un tamarinda muko-adhezīvajām un bio-adhezīvajām īpašībām **Dr.Lensor CL SOLUTION** kontaktlēcu kopšanas līdzeklim piemīt kontaktlēcu, asaru plēvīti un acs virsmas epitelijstūnas stabilizējoša iedarbība un asaru plēvīti normalizējoša iedarbība.

**1.3 Indikācijas**

Tas ir piemērots visu veidu mikro kontaktlēcu dezinfekcijai, skalošanai, tīrīšanai, mitrināšanai un ikdienas olbaltumvielu nosēdumu atdalīšanai.

**1.4 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

**1. 5-7 minūšu metode**

- Rūpīgi nomazgājiet un noslaukiet rokas ar tīru dvieli.
- Lai izvairītos no kļūdām, vienmēr sāciet darbošanos ar vienu un to pašu lēcu –labo vai kreiso.
- Izņemiet kontaktlēcu no acs, ielieciet to delnā un pievienojiet **Dr.Lensor CL SOLUTION** šķīdumu tik daudz, lai kopšanas līdzeklis pilnībā pārklātu kontaktlēcu.
- Maigi noburzējiet ar „turp-atpakaļ” kustībām abas lēcas virsmas 10-15 sekundes, izmantojot otras rokas rādītājpirkstu.
- Rūpīgi un bagātīgi noskalojiet lēcu ar **Dr.Lensor CL SOLUTION** līdzekli, lai atdalītu visus nosēdumus.
- Ievietojiet kontaktlēcu līdzeklim pievienotajā kontaktlēcu konteinerī.
- Atkārtojiet tās pašas darbības ar otras acs kontaktlēcu.
- Piepildiet kontaktlēcu konteineri ar **Dr.Lensor CL SOLUTION** līdzekli līdz atzīmei uz konteineru.
- Rūpīgi aizskrūvējiet kontaktlēcu konteineri un atstājiet kontaktlēcas iegremdētas šķīdumā vismaz 5-7 minūtes.
- Pirms kontaktlēcu lietošanas noskalojiet tās ar **Dr.Lensor CL SOLUTION**.

**2. Bezkontakta metode**

Izpildiet visus “5-7 minūšu metodes” aprakstā minētos soļus, bet atstājiet kontaktlēcas konteinerā piepildītā ar šķīdumu mērcēties 2-3 stundas vai visu nakti bez berzēšanas. Pirms kontaktlēcu lietošanas noskalojiet tās ar **Dr.Lensor CL SOLUTION** kontaktlēcu kopšanas līdzekli.

**1.5 KONTRINDIKĀCIJAS:**

Šķīduma lietošanai nav īpašu kontrindikāciju, izņemot alerģiju vai specifisku hipersensitivitātes reakciju uz kādu no šķīduma sastāvdaļām.

**1.6 PIESARDZĪBAI:**

Pēc pudeles atvēršanas **Dr.Lensor CL SOLUTION** līdzeklis ir jāizlieto 3 mēnešu laikā. Pēc šī laika pāri palikušais šķīdums ir jāizlej. Nelietojiet šķīdumu, ja pirms pirmās lietošanas reizes ir bojāts pudeles aizslēdzēj mehānisms, jo šādā gadījumā nav iespējams garantēt šķīduma sterilitāti. Lai izvairītos no kontaminācijas, nepieļaujiet šķīduma pudeles uzgala saskari ar nekāda veida virsmām. Pārlicieties, ka pēc katras lietošanas reizes pudele ir pienācīgi aizskrūvēta. Uzglabājiet pudeli vietā, kur tā nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai un temperatūrai, kas nepārsniedz 30°C.



Nelietot līdzekli pēc derīguma termiņa beigām.

**1.7 BRĪDINĀJUMI:**

Ja kontaktlēcas glabājušās **Dr.Lensor CL SOLUTION** šķīdumā ilgāk nekā 3-4 nedēļas, pirms lēcu lietošanas izlejiet veco šķīdumu un veiciet kontaktlēcu tīrīšanu vismaz ar “5-7 minūšu” metodi. Nelietojiet šķīdumu, ja jums ir hipersensitivitātes reakcija uz kādu no šķīduma sastāvdaļām. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Vienmēr lietojiet svaigu **Dr.Lensor CL SOLUTION** šķīdumu, pirms tam izlejot lietotā šķīduma atliekas no kontaktlēcu konteineru. Neaizvietojiet **Dr.Lensor CL SOLUTION** šķīdumu ar citu dezinfekcijas līdzekli. Konsultējieties ar savu acu aprūpes speciālistu pirms jebkuru oftalmoloģisko medikamentu lietošanas kontaktlēcu valkāšanas laikā. Nekad nepieļaujiet krāna ūdens saskari ar kontaktlēcām.

**1.8 KOMPLIKĀCIJAS:**

Nepārejoša traucējuma vai kairinājuma sajūtas gadījumā konsultējieties ar savu acu aprūpes speciālistu.

**DERĪGUMA TERMĒNS:** Atbilstoši un pareizi uglabājot tas ir 3 gadus pēc ražošanas dienas.



Prezīzi ievērojiet instrukcijas uz iepakojuma un saglabājiet šo tehniskās informācijas lapu.

**1.9 SASTĀVS**

Poliheksimetilēna biguanīds 0.0001%, dinātrija edetāts 0.1%, nātrija hialuronāts 0.01%, tamarinda ekstrakts 0.005%, līdzeklis satur līdz 100% attīrīta ūdens ar palīgvielām.

Revisione 01 ed\_2021 Data 04/01/2021

Elaborato PRRC	Verificato MQA	Approvato GM
----------------	----------------	--------------

**2 PĀRSKATĪTS**

 Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo - Italia CE 0425	REV. NN DEL 01/06/2021	 Confice F.Ill. no
--	---------------------------	-----------------------

**3 RIQUADRO SPIEGAZIONE SIMBOLI (MULTILINGUA) PRESENTI BOX E LABEL / SIMBOLU PASKAIDROJUMS**

	LV: Izvairīties no noplūdes apkārtējā vidē
	LV: Zaļais punkts – otrreizējā pārstrāde
	LV: Aseptiski sterilizēts
	LV: Izlasiet lietošanas instrukciju
	LV: Uzmanību, izlasiet instrukciju iepakojumā
	LV: Temperatūras augšējā robeža
	LV: Partija
	LV: Derīgs līdz
	LV: Ražošanas datums
	LV: Nelietot bojāta iepakojuma gadījumā
	LV: Nepakļaut saules staru iedarbībai
	LV: Paredzamais daudzums